

Perfect Bleach

HOME-BLEACHING-SYSTEM ZUR AUFHELLUNG VERFÄRBTER ZÄHNE

Indikationen

Bleichen vitaler Zähne:

- bei altersbedingten Zahnverfärbungen
- bei Flecken (White-Spot-Läsionen)
- bei Verfärbungen durch Medikamente (z. B. Tetracyclin)
- bei oberflächlichen Schmelzverfärbungen durch Fluorose
- bei ernährungsbedingten Ablagerungen

Bleichen devitaler Zähne (internes und/oder externes Bleichen):

- Verfärbungen aufgrund von Blutungen, verursacht durch Traumen

Ihre Vorteile


- Konzentration des Carbamidperoxid-Gels auch bei Unterbrechung der Kühlkette stabil
- Alle Materialien im Komplettsset enthalten:
  - Zwei Tiefziehfolien und Block Out Gel LC zur Herstellung der individuellen Zahnschienen
  - 4 x 2,4 ml Bleaching Gel
  - Aufbewahrungsdose für die Zahnschiene
  - Farbskala zum Nachvollziehen des Behandlungserfolgs
  - Patientenfreundliches Piktogramm und Gebrauchsinformation
- Auf Anfrage Patienteninformationen für Ihr Wartezimmer
- Mehrwert für die Praxis durch zusammenhängende Behandlungen (Professionelle Zahnreinigung, Röntgenaufnahmen)
- Patientenbindung durch Patientenzufriedenheit

Vorteile Ihrer Patienten

- Einfache und anwenderfreundliche Handhabung
- Wenig bis kaum Überempfindlichkeiten
- Erster Behandlungserfolg bereits ab der zweiten Anwendung bei einer Tragedauer von jeweils ca. 2 Stunden
- Keine Gingivareizung, da das Gel hochviskös ist (kein Ausfließen aus der Schiene) und die mitgelieferten hochwertigen Tiefziehfolien einen optimalen Sitz der Schiene garantieren.
- Angenehmes Minzaroma
- Kostengünstiger als In-Office-Bleaching

Perfect Bleach

ANWENDUNG

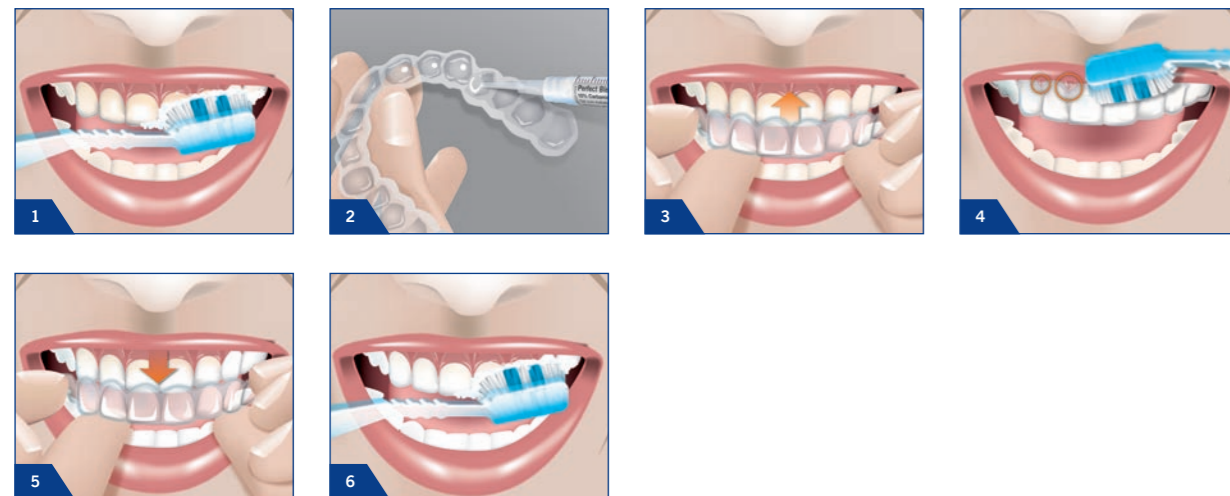

Perfect Bleach

HOME-BLEACHING-SYSTEM ZUR AUFHELLUNG VERFÄRBTER ZÄHNE



Handelsformen

REF 1660	Komplettsset, 6 x 2,4 ml Spritzen Bleichgel mit 10% Carbamidperoxid, 2 Tiefziehfolien, 1 x 1,2 ml Spritze Block Out Gel LC, Kosmetiktasche, Aufbewahrungsbox, Piktogramm, Farbskala
REF 1664	Komplettsset, 6 x 2,4 ml Spritzen Bleichgel mit 17% Carbamidperoxid, 2 Tiefziehfolien, 1 x 1,2 ml Spritze Block Out Gel LC, Kosmetiktasche, Aufbewahrungsbox, Piktogramm, Farbskala
REF 1658	Patientenkit, 4 x 2,4 ml Spritzen Bleichgel mit 10% Carbamidperoxid, Kosmetiktasche, Aufbewahrungsbox, Piktogramm, Farbskala
REF1659	Patientenkit, 4 x 2,4 ml Spritzen Bleichgel mit 17% Carbamidperoxid, Kosmetiktasche, Aufbewahrungsbox, Piktogramm, Farbskala
REF 1662	3 x 2,4 ml Spritzen Bleichgel mit 10% Carbamidperoxid
REF 1665	3 x 2,4 ml Spritzen Bleichgel mit 17% Carbamidperoxid

Fragen Sie Ihren persönlichen VOCO Dentalberater nach der Patienteninformation für das Wartezimmer.

Handelsformen

REF 1667	Perfect Bleach Office Set, Zubehör
REF 1668	Perfect Bleach Office 1 x 8 ml QuickMix Spritze, Zubehör
REF 1655	LC Dam 2 x 1 g Spritze, Zubehör

VOCO GmbH  
Postfach 767  
27457 Cuxhaven  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 4721-719-0  
Fax: +49 (0) 4721-719-109  
info@voco.de  
www.voco.de

Zu beziehen durch:

Jetzt auch als Office-Version erhältlich!



Perfect Bleach  
HOME-BLEACHING-SYSTEM  
ZUR AUFHELLUNG VERFÄRBTER ZÄHNE

## Perfect Bleach

### NATURAL WHITE

Das ästhetische Erscheinungsbild der Zähne gewinnt für immer mehr Menschen an Bedeutung. Verfärbungen der Zähne beeinträchtigen nicht nur das Aussehen, sondern haben Einfluss auf den gesamten Eindruck und wecken beim Patienten den Wunsch nach einer geeigneten Behandlung zur Zahnaufhellung. Perfect Bleach, das Home-Bleaching-System von VOCO, wird den Ästhetikansprüchen Ihrer Patienten gerecht.

Moderne Konzepte der Zahnmedizin beinhalten Maßnahmen der minimalinvasiven Therapie. Hier kommt es sowohl auf die Erhaltung der Funktion als auch auf die Ästhetik an, wobei die gesunde Zahnschicht zu schonen ist. Das Aufhellen der Zähne mit Bleaching-Gel bietet bei sachgemäßer Anwendung eine ebenso effektive wie schonende Möglichkeit, die Zahnästhetik wiederherzustellen. Eine Versorgung der Zähne mit Kronen oder Veneers erübrigt sich häufig damit.

#### Verfärbungen

Grundsätzlich lassen sich innere und äußere Zahnverfärbungen unterscheiden. Ist die Ursache der Verfärbung bekannt, kann das Praxisteam dem Patienten eine geeignete Behandlungsmethode vorstellen.

Ursachen äußerer Verfärbungen können Farbstoffe in Lebensmitteln und Getränken wie z. B. Curry, Kaffee, Rotwein und Tee, Tabakkonsum, Farbeinlagerungen in Schmelzrisse sowie Altersverfärbungen sein.

Innere Verfärbungen entstehen oft während der Zahnentwicklung. Ursachen können Nebenwirkungen von Medikamenten wie z. B. Tetracyclin sowie Verfärbungen durch eine Pulpennekrose sein. Da solche Verfärbungen im Schmelz und Dentin angesiedelt sind, können diese mechanisch, z.B. durch eine professionelle Zahnreinigung, nicht entfernt werden. In diesen Fällen eignet sich das Aufhellen mit einem Bleaching-Gel.

#### Indikationen

Mit Perfect Bleach können vitale und devitale Zähne aufgehellt werden. Folgende Verfärbungen lassen sich erfolgreich mit Perfect Bleach behandeln.

Bleichen vitaler Zähne:

- ernährungsbedingte Ablagerungen
- altersbedingte Zahnverfärbungen
- oberflächliche Schmelzverfärbungen durch Fluorose
- Verfärbungen durch Medikamente (z. B. Tetracyclin)
- helle Flecken (White-Spot-Läsionen)
- genetisch bedingte Verfärbungen (Anomalien)

- Bleichen devitaler Zähne (internes und/oder externes Bleichen): Bei Verfärbungen aufgrund von Blutungen, verursacht durch Traumen.

#### Perfect Bleach 10%/ 17% – das praktische Set

Perfect Bleach ist ein auf Carbamidperoxid basierendes Home-Bleaching-Material. Je nach Art der Verfärbung kann zwischen 10%iger und 17%iger Konzentration gewählt werden.

Das Perfect Bleach Set beinhaltet alle Materialien, die für die erfolgreiche Anwendung für zwei Kiefer benötigt werden. In der ebenso praktischen wie attraktiven Kulturtasche, die Sie Ihren Patienten mitgeben können, sind die Carbamidperoxid-Spritzen, die mit einem Piktogramm illustrierte Gebrauchsinformation für Ihren Patienten, die Farbskala zum Überprüfen



ZÄ Doreen Knebel, Berlin: „Wir verwenden Perfect Bleach von VOCO seit gut sieben Jahren in unserer Praxis und sind sehr zufrieden. Die Patienten sind begeistert von der guten Aufhellwirkung und freuen sich über das einfache Handling. Auch für uns in der Praxis ist die Applikation leicht zu erklären. Wir bestellen die Patienten immer nach zwei Wochen erneut ein, um einen Farbvergleich anzustellen. Aufgrund der Verwendung einer laborgefertigten Schiene treten so gut wie nie Probleme mit der Gingiva auf. Außerdem bleibt die gesamte Bleachingtherapie unter zahnärztlicher Beobachtung.“

des Behandlungserfolgs sowie die Aufbewahrungsbox für die Bleichschienen enthalten. Separat von den Patientenutensilien finden Sie alle Materialien, die Sie für die Herstellung der Schiene benötigen. Dazu gehören zwei Tiefziehfolien, das Block Out Gel LC sowie die Gebrauchsinformation sowohl für den Zahntechniker als auch für den Behandler.

#### Perfect Bleach – Schonend und effektiv zugleich

Zahlreiche Studien belegen, dass hochdosierte Bleaching-Gels nicht zu einer signifikant schnelleren und besseren Aufhellwirkung führen. Bereits mit niedrig konzentrierten Bleaching-Gels lassen sich deutliche Aufhellungserfolge erzielen, und das bei gleichzeitig schonender Behandlung der Zahnhartsubstanz. Perfect Bleach verfügt über eine ausreichend hohe Carbamidperoxid-Konzentration, um sowohl effektiv als auch für den Patienten schonend gegen Verfärbungen vorzugehen. Das in dem 17%igen Perfect Bleach enthaltene Natrium-

fluorid und Kalium sorgen ebenfalls dafür, dass während und nach der Behandlung Hypersensibilitäten vorgebeugt wird. Die hohe Stabilität des Carbamidperoxid-Gels gewährleistet bei sachgemäßer Aufbewahrung eine dauerhafte Lagerfähigkeit in Depot und Praxis.

#### Vorteile für Ihre Patienten

Die Handhabung von Perfect Bleach ist sehr einfach und anwenderfreundlich. Die Konsistenz des Gels verhindert Gingivairritationen, da es nicht aus der Schiene läuft. Ein weiterer Vorteil ist, dass eine kurze Tragezeit genügt. Ein Tragen der Schiene über Nacht ist nicht notwendig. Das Gel entfacht seine volle Wirkung innerhalb der ersten zwei Stunden nach dem Einsetzen der Schiene. Der erste Behandlungserfolg stellt sich bereits ab der zweiten Anwendung ein. Auch das frische Minzaroma des Gels ist angenehm für den Patienten.



Dr. med. dent. Franz Bschorer, Dinkelsbühl: „Für mich ist das Home-Bleaching die einzig richtige Methode, um die Patienten nachhaltig in diese Behandlung mit einzubeziehen. Mit Perfect Bleach machen wir bereits seit fünf Jahren sehr gute Erfahrungen. Perfect Bleach überzeugt schon in seiner 10%igen Konzentration mit einem deutlichen Aufhellungserfolg. Dabei ist es besonders schonend zur Zahnhartsubstanz. Und dank der individuell angefertigten Bleichschienen wird auch die Gingiva geschützt. Komplikationen und Hypersensibilitäten sind mit Perfect Bleach 10% noch nie aufgetreten. Die Handhabung des Sets ist sowohl für das Praxispersonal als auch für die Patienten denkbar einfach. Die im Set enthaltenen Tiefziehfolien zur Erstellung der Zahnschienen lassen sich leicht bearbeiten, perfekt anpassen und einfach mit dem Bleichgel versehen. So sind die Schienen von den Patienten auch zu Hause bequem zu tragen.“

## Perfect Bleach

### KLINISCHE ANWENDUNG



Vorher



Nachher



Vorher



Nachher



Vorher



Nachher



Vorher



Nachher