



ACROSEAL Automix süstlas

Pasta juurekanali täitmiseks gutta percha tihvtidega.

Acroseal on suurepärase kaltsiumhüdroksiidil põhinev endodontiline täidismaterjal, mis on mõeldud kanalite permanentseks täitmiseks. Lihtsam kasutada tänu automix süsteemile, mis väljutab ühtlase homogeense segu iga kord, kui kasutate. Jääb ära käsitsisegamisest tingitud ebamugav segadus ja puhastamine. Hoiab kokku aega ning vähendab ristkontaminatsiooni ohtu. Ei sisalda eugenooli. Röntgenopaakne.

Kasutamine

Gutta percha tihvt(id) katta Acrosealiga ja kondenseerida. Sobib kasutamiseks kõigi obturatsioonitehnikatega. Kõvanemisaeg 16 kuni 24 tundi, sõltuvalt niiskusesisaldusest juurekanalis.

Tuubid sulgeda hoolikalt peale kasutamist.

Pakend

2 x 8.6 g automix süstlas, 15 x mixing tips, 15 x intra-oral tips, segamisalused