



DETARTROL ULTRA

Hambakivi eemaldamise lahus

Näidustused

Hambakivi pehmemdamine ja osaline lahustamine enne mehaanilist eemaldamist.

Vastunäidustused

Allergia joodi vastu.

Rasedad või imetavad naised.

Pakend

13ml pudel

Koostis

Kontsentreeritud vesinikkloriidhape 20,00 g

Jood 0,75 g

Abiained kuni 100,00 g

(etanool, puhastatud vesi, kaaliumjodiid)

Omadused ja eelised

Tavajuhtudel on näidustatud mehaaniline puhastamine abrasiivse pastaga. Muudel juhtudel tuleks kaaluda aga teistsugust lähenemist, nt **selliste hammaste puhastamine, mis loksuvad paradontiidi tõttu**, või hambad, mille külge hambakivi on eriti tugevalt kinnitunud.

DETARTROL ULTRA hõlbustab hambakivi eemaldamist. Lahustavate omaduste tõttu pehmemdab see hambakivi.

- DETARTROL ULTRA-l on väga tugev hambakivi eemaldamise võime, mis toimib järk-järguliselt ja sujuvalt.
- **See värvib ajutiselt** nii elava kui ka surnud orgaanilise materjali, tänu millele on võimalik jälgida töö edenemist, ning toob esile fissuure (peenikesed vaod, mõrad hambapinnal), mida võib olla muidu raske märgata.

Kasutusjuhend

- Pange väike kogus DETARTROL ULTRA-t vatitampooniga hoolikalt antud pinnale, mida soovite hambakivist puhastada.
- Laske mõjuda umbes 30 sekundit ja loputage seejärel hoolikalt veega.

Olulised märkused

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

- Vältida kokkupuudet limaskestaga.
- Kui tegemist on väga keerulise hambakivieemaldusega (eriti, kui hambakivi on paradontiidi kolde lähedal), võib toodet kasutada kaks või kolm korda järjest. Sellisel juhul on soovitatav kaitsta iget ja külgnevaid hambaid.
- Tuleohtlik toode.

Ainult professionaalseks kasutamiseks hambaravis

Tootja: Septodont (Prantsusmaa) www.septodont.com