



## **GUTTASOLV**

Gutta percha lahustaja

### **Näidustused**

- Juurekanali esmase täitmise ajal, kasutades gutta perchasid ja lateraalse kondensatsiooni meetodit.
- Ümberravi ajal, kui juurekanalite täitmiseks on kasutatud gutta perchasid.

### **Pakend**

13 ml pudel

### **Koostis**

Eukalüptool

### **Omadused ja eelised**

- 100% eukalüptoolilahus.
- Aitab eemaldada gutta percha baasil endodontilisi täidiseid.
- Pehmendab gutta percha juuretäidise materjale, et need kiirelt ja efektiivselt eemaldada.
- Pehmendab gutta percha tihvte, et tihvt kohanduks kanaliseintega.

### **Kasutusjuhend**

- **ESMANE JUUREKANALI TÄITMINE (LATERAALNE KONDENSATSIOON)**  
GUTTASOLV pehmendab gutta percha pinda selliselt, et gutta percha kohandub täiuslikult juurekanali ebatasasuste ja kontuuriga.
  - Hambaarst valib juhttihvti lähtuvalt juurekanali tüübist ja suurusest: gutta percha tipmine ots kastetakse lahustisse.
  - Tihvt sisestatakse kanalisse kogu tööpikkuses, kasutades kergelt üles- ja allasuunalist liigutamist.
  - Seejärel tõmmatakse tihvt kanalist välja ja kaetakse juurekanali täitmiseks kasutatava pastaga.
  - Järgmiseks sisestatakse tihvt uuesti ettevaatlike pumpavate liigutustega, et viia juureravi pasta ka juurekanali tippu.
  - Seejärel, kasutades GUTTASOLV-iga niisutatud spreader-it (lateraalselt kondensaatorit), viiakse läbi tihvti lateraalne kondensatsioon.
- **ÜMBERRAVI**
  - Tilgutage kaks tilka lahust pulbikambrisse.
  - Seejärel kasutage pehmendatud gutta percha eemaldamiseks juurekanali endodontilist instrumenti, kuni jõuate juurekanali tipuni.
  - Lisage aeg-ajalt värsket lahustit ja vahelduvalt loputage vahelduvalt naatriumhüpokloriidiga (Parcan).

### **Olulised märkused**

#### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel**

- Tuleohtlik.

- Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.
- Mitte alla neelata.

**Säilitamine**

Hoida toatemperatuuril originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

*Ainult professionaalseks kasutamiseks hambaravis*

**Tootja:** Septodont (Prantsusmaa) [www.septodont.com](http://www.septodont.com)