



ISODAN

Dentiini ülitundlikkuse ravi

Näidustused

Dentiini ülitundlikkus.

ISODAN'i saab kasutada kõigil eksponeeritud dentiinipindadel, kroonidel ja hambakaela erosioonidel.

ISODAN'i saab kasutada amalgaamide ja muude restauratsioonimaterjalide all.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toote mistahes koostisosa suhtes.

Pakend

1 x 5 ml pudel + 20 aplikatsiooniharja

Koostis

- Kaaliumnitraat, HEMA(2-hüdroksüületüül metakrülaat), naatriumfluoriid
- Abiained

Omadused ja eelised

ISODAN-i eesmärk on ravida dentiini ülitundlikkust, mille põhjuseks on mistahes dentiini ärritavad faktorid: füüsikalised tegurid (külm, kontaktärritus, kuum), keemilised tegurid (happeerosioonid), füsioloogilised tegurid (abrasioon, hambaerosioonid).

- Kliiniliselt tõestatud pikaajaline ülitundlikkuse leevendamine.
- Moodustab dentiini tuubulites barjääri ja takistab tuubulitesisese vedeliku liikumist.
- Sisaldab naatriumfluoriidi, mis tugevdab emaili/dentiini barjääri.
- HEMA toimib niisutusainena ja aitab ISODAN-i ühtlaselt levitada.
- Saab kasutada restauratsiooni all.

Kasutusjuhend

- Isoleerige üks või mitu töödeldavat hammast vatirulliga.
- Kuivatage töödeldava ala pind hoolikalt.
- Tilgutage väike tilgake ISODAN-i alusele või topsikusse.
- Võtke aplikaatoriga või pintsliga alusel väike kogus lahust.
- Kandke õhuke kiht materjali töödeldavale pinnale.
- Pusteldage ettevaatlikult suruõhuga.
- Korrake protseduuri kaks kuni kolm korda, kuni pind muutub läikivaks.

JUHUL, KUI PATSIENT KAEBAB ÜLITUNDLIKKUSE JÄTKUMIST, KORRAKE PROTSEDUURI ÜHE NÄDALA PÄRAST.

Olulised märkused

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

- Xi – Ärritab silmi ja nahka.
- Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust. Kokkupuutel loputada rohke veega.
- Vältige töödeldud piirkonna pesemist 24 tunni jooksul.

- Vältige 24 tunni jooksul happelisi sööke ja jooke.

Säilitamine

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ainult professionaalseks kasutamiseks hambaravis

Tootja: Septodont (Prantsusmaa) www.septodont.com