

Racegel

Termogeelistuv vedelik*
gingivaalse serva preparatsiooniks



**Peatab veritsuse ja koevedeliku
nõrgumise igemetaskust!**

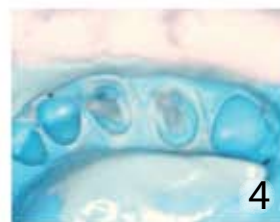
Mistahes kliinilist protseduuri sooritades (proteesimine, täidised)
puutute kokku erinevate vedelikega (sülg, veri).

Racegel'i abil, mis on
tõeline keemiline tõke,
saate kiiresti:

- puhastada töövälja, kontrollides veritsust ja koevedeliku nõrgumist
- kergesti pääseda ligi preparatsiooni servadele



Kliinilised juhtumid



*Termogeelistuv vedelik:
toode on toatemperatuuril vedelik.
Igemeserval muutub vedelik geeliks



Näidustused:

- **Gingivaalse serva preparatsiooniks ilma retraktsiooniniidita*:**

- enne jäljendi võtmist
- enne komposiit- või klaasionomeertäidise asetamist
- enne laminaatide tsementeerimist

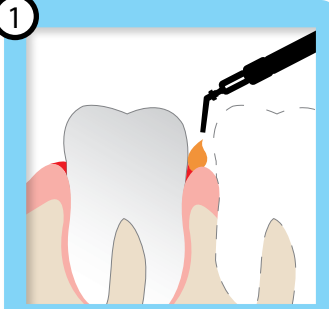
*kui kasutate retraktsiooniniiti, hõlbustab geel niidi viimist igemetaskusse.

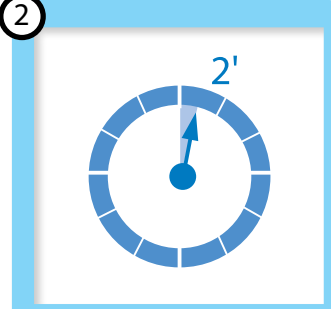
- **Kontroll veritsuse ja igemevedeliku nõrgumise üle, seda eriti täidise asetamisel.**

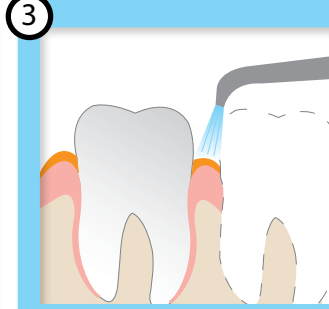
Kirjeldus:

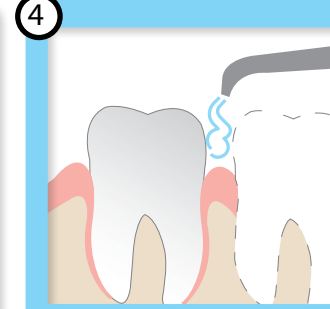
Omadused	Kirjeldus
✓ Astringent (25% alumiiniumkloriid)	Avab juurdepääsu preparatsiooni servadele Hoiab töövälja kuiva Aitab kontrollida veritsust ja koevedeliku immitsemist Ühildub kõikide jäljendmaterjalidega
✓ Geeljas konsistents	Kerge ja valutu aplikatsioon
✓ Eelpainutatud aplikaatori tipp	Kerge käsitseda
✓ Termogeelistuv vedelik	Ei leki, kerge eemaldada
✓ Värviline geel	Tööväljal kerge märgata

Instruktsioon:

- 

Kanna piisav kogus geeli otse igemeservale, jälgides hoolikalt prepareeritud hamba kontuuri
- 

Lase seista umbes 2 minutit
- 

Loputa
- 

Kuivata kergelt pustliga

Karp sisaldab:

- 3 x 1.4 g süstalt geeli
- 30 geeli aplikaatori otsikut

