



SEPTOJECT süstlanõelad

Steriilsed ühekordsed hambaravinõelad

Näidustused

Steriilsed ühekordsed silikooniga kaetud hambaravinõelad.

Kohaliku tuimestuse rutiinne süstimine hambaravis.

Pakend

100 kahe otsaga ühekordset hambaravinõela pakis. Neid ei ole võimalik steriliseerida!

Nõelte suurused:

- 0,3x10mm
- 0,3x12mm
- 0,3x16mm
- 0,3x21mm
- 0,3x25mm
- 0,4x35mm

Omadused ja eelised

- Väiksem koekahjustus tänu kolme avaga nõelale, poleeritud ja silikooniga kaetud kanüülile ning nõela suurepärasele painduvusele.
- Kõrgekvaliteediline roostevabast terasest nõel vähendab purunemisohtu.

Kasutusjuhend

- Avage steriilne (tagumine) kork vahetult enne kasutamist, pöörates kahte ühilduvat korki vastassuunaliselt.
- Keerake eelkeermestatud nõel süstla eelkeermestatud kolvi külge.
- Eemaldage nõela plastkork vahetult enne süstimist.
Seda saab kasutada uuesti nõela eemaldamiseks süstla küljest, et vältida torke riski.
- Visake kasutatud nõel torkekindlasse konteinerisse vastavalt kõigile kehtivatele meditsiinijäätmete regulatsioonidele.

Olulised märkused

HOIATUSED

- Ärge mitte kunagi pange nõelale korki tagasi käsitsi. Kasutage ainult hambaravis aktsepteeritud korgi tagasipaneku protseduure. Korgi tagasipanek käsitsi või kõverdunud või purunenud nõelale võib põhjustada tahtmatuid nõelatorkeid.
- Ärge painutage, lõhkuge ega muul viisil pingestage nõelu, sest see võib teile ja/või patsiendile põhjustada raskeid vigastusi.
- Ärge keerake nõela süstimise ajal süstlakulbi külge, sest nõelad võivad murduda ja patsiendi kudedesse jääda, olles potentsiaalselt raske püsiva vigastuse põhjuseks. Ärge kasutage lühikesi nõelu (< 30 mm), kui pehme koe eeldatav paksus on lähedane nõela pikkusega.
- Vältige tugevat survet ja nõela ülemäärast liigutamist süstimise ajal, sest see võib põhjustada nõela purunemist, mis võib põhjustada teile ja/või teie patsiendile raskeid vigastusi.
- Olge eriti valvas patsiendiga, kellel on nõelakartus või kes näib olevat eriti kartlik, kui muudate nõela asukohta süstimise ajal.

- SEPTOJECT XL puhul: vältige liiga kiiret süstimist ja/või liigset rõhku, sest see võib süstimise ajal põhjustada patsiendile suuremat valu.

ETTEVAATUSABINÕUD

- Hoida kasutusajani originaalpakendis.
- Lugege läbi süstevahendiga kaasas olevad kasutusjuhised.
- Kui sulgur (nõela tagumine kork) on katki, siis nõel EI OLE STERIILNE ning SEDA EI TOHI KASUTADA.
- Ainult ühekordseks kasutamiseks. See seade on ette nähtud kasutamiseks ühel patsiendil. Mistahes korduv kasutamine põhjustab teiste patsientide ja kasutaja jaoks kriitilisi riske, sealhulgas infektsioon ja traumat, sest nõel ei ole enam steriilne ja nõela purunemise risk on suurem.
- Kui on vajalik mitme ampulli kasutamine, siis vahetage iga ampulli järel ka nõela, et vähendada nõela kahjustumist /purunemist/paindumist.
1 patsient / 1 ampull / 1 nõel
- Nõuane SEPTOJECT XL'i nõelte esmakordsetele kasutajatele: kuna XL suuruses nõeltel on suurem diameeter kui teistel nõeltel, siis tuleb nõela paindumise/murdumise riski vähendamiseks pehme kude enne süstimist stabiliseerida.

Ainult professionaalseks kasutamiseks hambaravis

Tootja: Septodont (Prantsusmaa) www.septodont.com