



## **HEMOCOLLAGENE**

Veise kollageenil põhinevad steriilsed hemostaatilised käsna

### **Näidustused**

Steriilsed hemostaatilised käsna verejooksu peatamiseks pärast hamba ekstraktsiooni.

### **Pakend**

24 steriilset käsna ühekordseks kasutamiseks.

### **Koostis**

Naturaalne kollageen 0,027g ühe käsna kohta.

### **Omadused ja eelised**

- Eraldi blisterpakendites steriilsed käsna.
- Veise kollageen aitab kaasa verejooksu peatumisele.
- Täielikult resorbeeruv ja kudede loomulikku taastumist soodustav.
- Käsna suurus vastab hambaravi tegelikele vajadustele.

### **Kasutusjuhend**

- Enne HEMOCOLLAGENE käsna asetamist hambasompu, puhastada see hoolikalt. Eriti tuleks jälgida, et kõik hambakillud (tükid) oleks eemaldatud.
- Kuivatada haav ning asetada selle peale kuiv HEMOCOLLAGENE käsna kas kergelt surudes või mitte olenevalt sellest, kui palju haav veritseb. Vajadusel võib käsna asetada vastavale kohale ning õmmelda paari pistega hambasomp kinni.
- HEMOCOLLAGENE käsna resorbeerub haavas täielikult.
- Soovitav oleks HEMOCOLLAGENE käsitlemisel kasutada siledaid instrumente.
- Mitte panna haava üleliia palju käsna.
- Asetada käsna otse haava, jälgides, et käsna ei satu eelnevalt sülg ega verd.
- Hoida käsna steriilses, kinnises pakendis ning avada alles vahetult enne kasutamist.

### **Olulised märkused**

#### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel**

- Mitte kasutada HEMOCOLLAGENE käsna põletikulistes piirkondades.
- HEMOCOLLAGENE käsna ei tohi niisutada.
- Mitte panna HEMOCOLLAGENE käsna autoklaavi.
- Jälgida, et käsna steriilsus on säilinud enne selle haava asetamist (st et pakend on terve).
- Kõik mitte-kasutatud käsnatükid tuleb ära visata, kuna need ei ole enam steriilsed.

#### **Säilitamine**

- Käsna steriilsuse tagamiseks ja niiskuse eest kaitsmiseks ärge eemaldage kuumtihendatud kaitsekilet ning võtke käsna kotist välja alles siis, kui olete valmis seda kasutama.
- Hoida eemal soojusallikatest.

*Ainult professionaalseks kasutamiseks hambaravis*

**Tootja:** Septodont (Prantsusmaa) [www.septodont.com](http://www.septodont.com)